

**SERUM-GEL**

Monovette 30 min.  
senkrecht gerinnen,  
danach  
**zentrifugieren.**

Bei Serum-Monovetten  
**ohne Gel:**  
Probe zentrifugieren,  
Serumüberstand in  
Neutralröhrchen  
überführen.

**EDTA 2,7 ML**

Blutbild, HbA1c,  
BSG, PCR.

Lagerung bei RT.

**Genetische**  
Untersuchungen:  
Monovette komplett  
**beschriften**  
(Name, Vorname,  
Geburtsdatum).

**Citrat-Monovette**

Gerinnungsanalysen  
**komplett befüllen**  
(Fülllinie).

**EDTA/-Citrat- PLASMA**

Gewinnung von **EDTA-  
oder Citrat-Plasma:**

EDTA-/ oder Citrat-  
Monovette  
zentrifugieren,  
Plasmaüberstand in  
Neutralröhrchen  
abpipettieren,  
beschriften, tiefgefroren  
versenden/lagern.

**HEPARIN**

T-SPOT.TB,  
ELISPOT,  
Granulozyten-  
funktion.

Versand binnen  
24 h bei RT.

**EDTA 7,5 ML**

Blutgruppe,  
Antikörpersuchtest,  
Fetaler Rhesusfaktor.

Hinweis für fetalen  
Rhesusfaktor:  
Separate Monovette  
und mit Name,  
Vorname, Geb.-Dat.  
**beschriften.**

**THROMBOEXACT**

**Nur** Thrombozyten-  
messung,  
bei V.a. EDTA-  
induzierte  
Pseudothrombo-  
zytopenie.

Bei RT lagern.

**STERILES RÖHRCHEN**

Serum/Plasma  
(gefroren), Punktat,  
Liquor, Biopsate,  
Haare,  
Fruchtwasser,  
Biopsate: + ca. 1ml  
NaCl 0,9%).  
Kein Formalin!  
**Material bitte auf  
Röhrchen  
vermerken.**

**GLUCOEXACT**

Glucose, OGT.  
**Komplett  
befüllen  
(Fülllinie)!**

Lagerung ca.  
48 h bei RT.

**IDK / IFOBT**

Blut im Stuhl,  
Calprotectin,  
Lactoferrin,  
Pankreaselastase

**Nicht für  
Mikrobiologie!**



## THARMAC GYNOPREP

HPV Screening/Typisierung

Bürste im Medium gut auswaschen und **NICHT** im Medium belassen!



## URIN-MONOVETTE

Urindiagnostik,  
Virusnachweis  
(z.B. CMV).

Für Keime/Pilze  
Borat-Urin verwenden.



## COBAS DUALSWAB

STI Screening (PCR)  
Respiratorische Erreger (PCR)

STI: u.a. Chlamydien,  
Gonokokken.  
Corona, RSV, Influenza.  
Nur einen Tupfer belassen  
& abbrechen.  
Lagerung  
im Kühlschrank /bei RT



## ROCHE COBAS URIN

Urin-PCR Diagnostik

**Erststrahl** mit Pipette in  
Röhrchen überführen.  
Danach 5x mischen.  
Lagerung im  
Kühlschrank/bei RT



## VIRUSNACHWEIS

Herpes genitalis

Abstrich zum  
Virusnachweis bei  
Herpes genitalis.



## ABSTRICH TROCKEN


Trocken versenden oder in  
Virustransportmedium einbringen  
(rote Kappe). **KEIN GEL!**

Dicker Abstrich: Wunden, Gyn  
Dünne Abstriche: Kinder, Urethral



## ABSTRICH mit GEL

Abstriche **MIT GEL**  
zur Bakterienkultur  
(aerob/anaerob) &  
transportempfindliche  
Erreger.  
Lagerung im  
Kühlschrank.

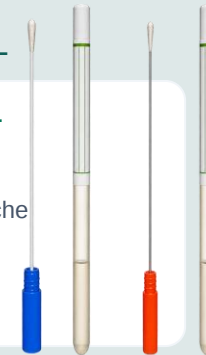

## STUHLRÖHRCHEN

Mikrobiologie:  
Bakterien, Viren,  
Würmer, Protozoen,  
C. Diff.,  
Helicobacter-Antigen.  
Lagerung im  
Kühlschrank.



## SPUTUMBECHER

Sputum / Urin

Sputum für allg.  
Bakteriologie,  
Mykobakterien-  
PCR & Kultur.  
Urin:  
Nur für Tbc-Diagnostik.



## URICULT / URINAX

Eintauchnährboden

In separatem Gefäß in Urin  
eintauchen, abtropfen,  
Gefäß ohne Restflüssigkeit  
fest verschrauben.  
Indikation: Nur bei  
Transport > 48 h oder ohne  
Borat-Option.



## BLUTKULTUREN

Aerob / Anaerob

Allg. Erreger,  
je 10 ml pro  
Flasche.  
Nicht vorbebrüten!  
Lagerung bei RT.



## URIN BORAT

Bakterien/Pilze aus  
Urin.  
Mit Borat-Stabilisator.  
**Komplett befüllen  
(Fülllinie)!**  
Transport innerhalb  
48h.

