

**SERUM-GEL**

Monovette 30 min.
senkrecht gerinnen,
danach
zentrifugieren.

Bei Serum-Monovetten
ohne Gel:
Probe zentrifugieren,
Serumüberstand in
Neutralröhrchen
überführen.

**EDTA 2,7 ML**

Blutbild, HbA1c,
BSG, PCR.

Für Genetische
Untersuchungen:
Monovette komplett
beschriften
(Name, Vorname,
Geburtsdatum).

Lagerung bei RT.

**Citrat-Monovette**

Gerinnungsanalysen.

Bitte komplett
befüllen
(Fülllinie).

**EDTA/-Citrat- PLASMA**

Gewinnung von
EDTA- / Citrat:

EDTA-/ oder Citrat-
Monovette
zentrifugieren,
Plasmaüberstand in
Neutralröhrchen
abpipettieren ,
beschriften, tiefgeforen
versenden/lagern.

**HEPARIN**

T-SPOT.TB,
ELISPOT,
Granulozyten-
funktion.

Versand binnen
24 h bei RT.

**EDTA 7,5 ML**

Blutgruppe,
Antikörpersuchtest,
Fetaler Rhesusfaktor.

Immer mit Name,
Vorname,
Geb.-Dat.
beschriften.
Für Fetalen
Rhesusfaktor separate
Monovette einsenden.

**THROMBOEXACT**

Nur Messung
der Thrombozyten
bei V.a. EDTA
induzierte Pseudo-
thrombzytopenie.

Bei RT lagern.

**STERILES/NEUTRALES
RÖHRCHEN**

Serum/Plasma
(gefroren), Punktat,
Liquor, Haare,
Fruchtwasser.
Bei Biopsaten + ca.
1ml NaCl 0,9%.
Kein Formalin!

**Material bitte auf
Röhrchen
vermerken.**

**GLUCOEXACT**

Glucose, OGT.

Bitte komplett
befüllen
(Fülllinie).

Lagerung ca.
48 h bei RT.

**IDK / IFOBT**

Blut im Stuhl,
Calprotectin,
Lactoferrin,
Pankreaselastase.

Stabilität für
Blut im Stuhl:
5 Tage RT/
7 Tage gekühlt

Nicht für Mikrobiologie
verwenden.



THARMAC GYNOPREP

HPV Screening/Typisierung

Bürste im Medium gut auswaschen und **NICHT** im Medium belassen!



URIN-MONOVETTE

Ohne Stabilisator

Urindiagnostik,
Virusnachweis
(z.B. CMV).

Für Keime/Pilze
Borat-Urin verwenden.



COBAS DUALSWAB

STI Screening (PCR)
Respiratorische Erreger (PCR)

STI: u.a. Chlamydien,
Gonokokken.
Corona, RSV, Influenza.
Tupfer belassen und
abbrechen.
Lagerung: RT/Kühlschrank



ROCHE COBAS URIN

Urin-PCR Diagnostik

Erststrahl mit Pipette in
Röhrchen überführen.
Danach 5x mischen.

Lagerung:
RT/Kühlschrank



VIRUSNACHWEIS

Herpes genitalis

Abstrich zum
Virusnachweis bei
Herpes genitalis.



ABSTRICH TROCKEN

Trocken versenden oder in
Virustransportmedium einbringen
(rote Kappe). **KEIN GEL!**


Dicker Abstrich: Wunden, Gyn
Dünne Abstriche: Kinder, Urethral



ABSTRICH mit GEL


Abstriche **MIT GEL**
zur Bakterienkultur
(aerob/anaerob) &
transportempfindliche
Erreger.

Lagerung: RT/
Kühlschrank.

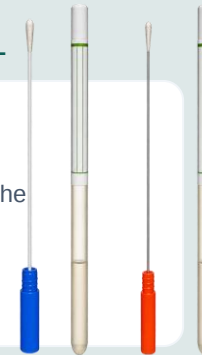

STUHLRÖHRCHEN

Mikrobiologie:
Bakterien, Viren,
Würmer, Protozoen,
C. Diff.,
Helicobacter-Antigen.
Lagerung:
Kühlschrank.

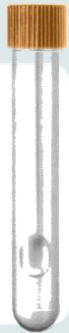

URIN BORAT

Bakterien/Pilze aus Urin.
Mit Borat-Stabilisator.
Komplett befüllen
(Fülllinie)!

Transport < 48h bei RT.



URICULT / URINAX

Eintauchnährboden

In separatem Gefäß in Urin
eintauchen, abtropfen,
Gefäß ohne Restflüssigkeit
fest verschrauben.
Indikation:
Nur bei Transport > 48 h
oder ohne Borat-Option.



BLUTKULTUREN

Aerob / Anaerob

Allg. Erreger,
je 10 ml pro
Flasche.
Nicht vorbebrüten!

Lagerung bei RT.



SPUTUMBECHER

Sputum / Urin

Sputum für allg.
Bakteriologie,
Mykobakterien-
PCR & Kultur.

Urin:
Nur für Tbc-Diagnostik.

